


GPS H66

Uživatelský manuál




Upozornění! Toto zařízení nenahrazuje zdravotnické pomůcky, které používá lékařský personál. Jedná se pouze o pomůcku pro orientační měření krevního tlaku a tepové frekvence.

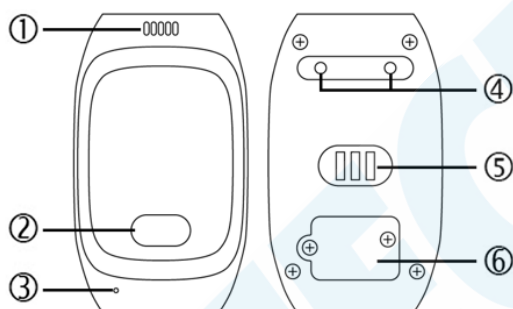

1. POPIS VÝROBKU



1. Reproduktor
2. Ovládací tlačítko/SOS tlačítko
3. Mikrofon
4. Magnetické kontakty pro nabíjení
5. Senzor pro měření hodnota
6. Kryt SIM karty

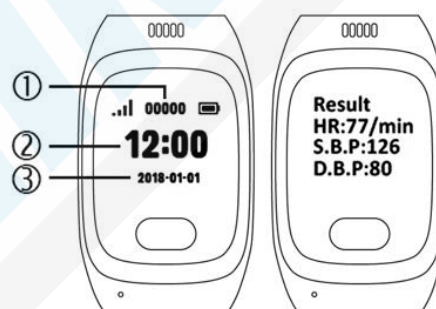
2. POPIS DISPLEJE




1. Měření kroků
 2. Čas
 3. Datum
-  síla GSM signálu
 úroveň nabití baterie




Výsledky:
 HR: Tepová frekvence
Krevní tlak:
 S.B.P.: Nejvyšší hodnota
 D.B.P.: Nejnižší

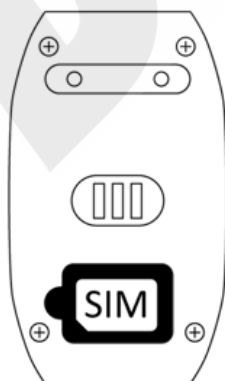3. VKLÁDÁNÍ SIM KARTY



V balení by se měl nacházet malý šroubováček. Odšroubujte dva šroubky krytu a otevřete kryt.

 Vložte SIM kartu pozlacenými kontakty dolů. Přišroubujte zpět kryt.

标准-SIM卡		25mm×15mm	
Micro-SIM卡		15mm×12mm	SIM1
Nano-SIM卡		12mm x 9mm	SIM2

Jakou SIM kartu použít?

Hodinky podporují SIM karty s 2G sítí. Můžete použít jakéhokoliv operátora s tím, že musí být ze SIM karty odstraněn PIN kód a smazány všechny kontakty (**POZOR! I na nové SIM kartě je kontakt na operátora, sanitku, PČR...to vše SMAŽTE!**). K tomu využijte mobilní telefon.

SIM karta **MUSÍ** být datová, spotřeba dat je měsíčně cca. 30mb/měs. stačí se tedy s operátorem domluvit na co nejnižším možném tarifu, nebo můžete využívat dobíjecí SIM kartu na kredit, pouze se informujte zda-li má karta data aktivní, případně je aktivujte a ohlíďte si dostatečný kredit.

ZAPÍNÁNÍ HODINEK:

Podržte tlačítko po dobu 3 sekund, nebo dokud se nerozsvítí displej.

4. NABÍJENÍ:

Zapojte USB kabel do USB adaptéru (není součástí balení, můžete použít USB adaptér od mobilního telefonu). Na druhém konci kabelu se nachází magnetické kontakty, ty stačí přiložit ke kontaktům na zadní straně hodinek a nabíječka se sama přichytí.

Jsou-li hodinky zapnuté, položte je displejem dolů, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění nabíječky. Ujistěte se, že se na senzoru nenachází žádné objekty.

5. FUNKCE:

Spuštění alarmu (SOS):

Podržení tlačítka po dobu 3 sekund spustí SOS alarm. Hodinky začnou vytáčet Vámi nastavená telefonní čísla. (nastavit lze až 3 SOS telefonní čísla)

Měření krevního tlaku, tepu:

Krátce stiskněte tlačítko a opakovanými krátkými stisky listujte v menu hodinek, dokud se nezobrazí ikona srdce. Nechte tuto položku zobrazenou a čekejte, k měření dojde automaticky už je zobrazením této ikony.

Realizace a příjem hovorů:

Krátkými stisky tlačítka přejděte v menu hodinek na jméno kontaktu (jména kontaktů se nastavují v aplikaci, poté jsou zobrazena v menu hodinek). Podržte tlačítko déle a hodinky začnou na Vámi zvolený kontakt telefonovat.

Hovor ukončíte krátkým stiskem tlačítka. Příchozí hovory jsou signalizovány melodii a vibracemi hodinek,

Pro příjem hovoru stačí krátce stisknout tlačítko.

VYPÍNÁNÍ HODINEK:



Krátkými stisky tlačítka přejděte v menu na položku OFF. Podržte tlačítko déle a hodinky se vypnou.

6. STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE:

Ve Vašem mobilním telefonu otevřete aplikaci Obchod Play (Android) nebo AppStore (iOS) zadejte do vyhledávání "Ai Care" nebo použijte QR kód níže.

UPOZORNĚNÍ! Při pravidelných údržbách se může stát, že aplikace dočasně z obchodu zmizí, nebo naopak nebude fungovat QR kód. Toto nejsme schopni ovlivnit, ale byli jsme ujištěni, že vždy bude fungovat alespoň jedna varianta pro instalaci aplikace.



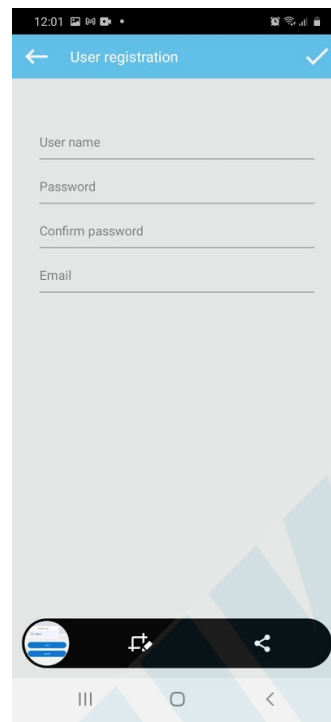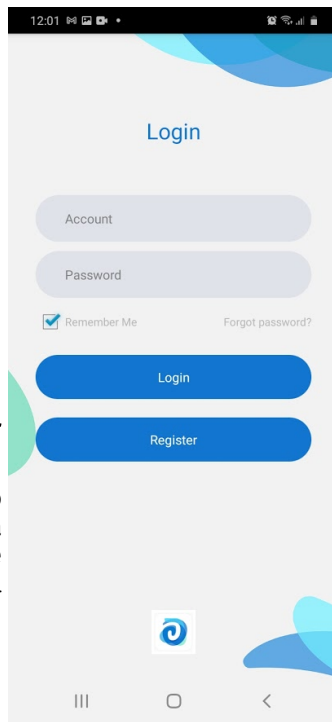

<---ULOŽENÍ
NASTAVENÝCH
PARAMETRU

1. Klikněte na **Register**




2. Vyplňte **User name**: uživatelské jméno

Password: heslo

Confirm password: opakujte zadání hesla

Email: v případě ztráty hesla je nutné vyplnit Váš e-mail



Po úspěšné registraci zadejte do pole **Account** Vaše nové uživatelské jméno a do pole **Password** heslo. Potvrďte tlačítkem **Login**.

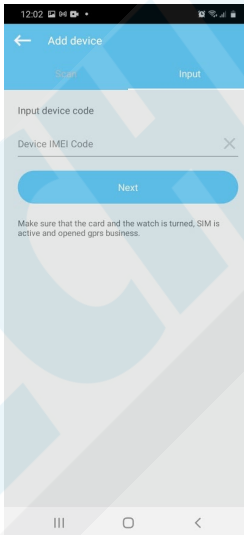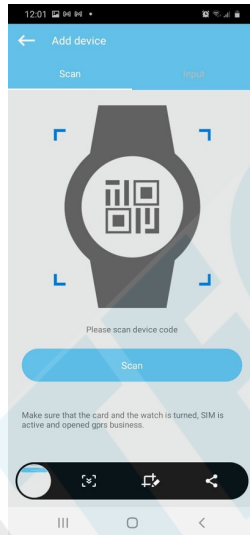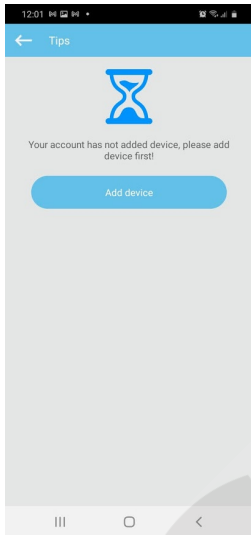

Pro přidání nového náramku klikněte na "ADD DEVICE" (přidat zařízení)

V horní nabídce můžete vybrat "Scan" nebo "Input"

Scan: tato funkce je dostupná pouze u hodinek s displejem, proto zvolte
Input: Ručně vyplníte IMEI hodinek (pro zjištění IMEI pošlete na hodinky SMS #status#) IMEI se také nachází na krabici.

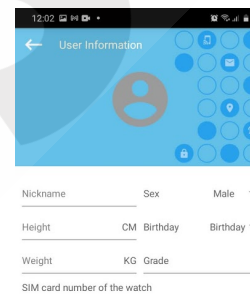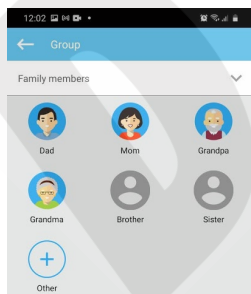

Nickname: přezdívka

Height: Výška

Weight: Hmotnost

Sex: pohlaví (male/muž, female/žena)


Birthday: narozeniny

Grade: poznámka

SIM card number: telefonní číslo SIM karty vložené v hodinkách

Vyberte kdo bude náramek nosit. Pokud chcete nastavit vlastní jméno tapněte na "Other" a vyplňte

Tyto položky jsou nepovinné. Můžete pokračovat tlačítkem "Complete" nebo vyplňte údaje.

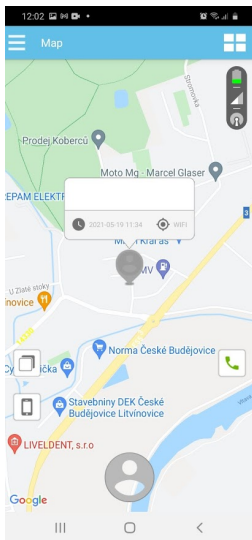

Ikona náramku je **šedivá** pokud je náramek ve stavu "offline" tedy s ním nelze přes aplikaci nic dělat. K tomu, aby se přepnul do "**online**" stavu jsou nutná následující nastavení:


1. Nastavte správnou APN síť operátora:

Pošlete SMS zprávu do náramku ve tvarech:

Vodafone: #apn#=230,03,internet,internet,null,null#

T-mobile: #apn#=230,01,internet.t-mobile.cz,internet.t-mobile.cz,null,null#




O2: #apn#=230,02,internet,internet,null,null#

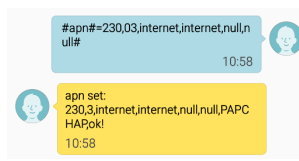

2. Nastavte správnou IP adresu aplikace:

Pošlete SMS zprávu do náramku ve tvaru: #host#=appapi.jiai.pro,8018#

Jakmile je náramek **online**, rozsvítí se ikona v aplikaci **modře**

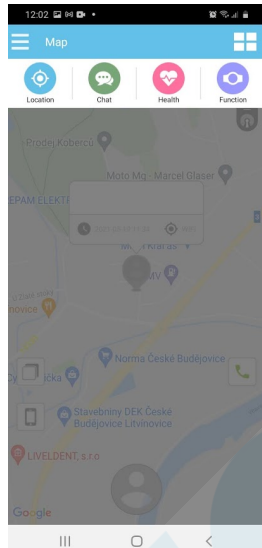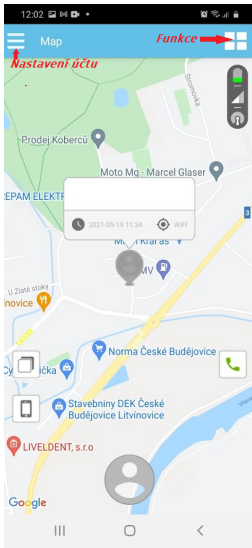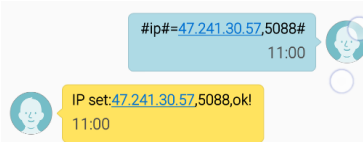


Pro okamžitou lokalizaci

Odesláni/poslech audio vzkazů

Prohlížení záznamů o měření tlaku, tepu, kroků, teploty

Funkce: nastavení funkcí náramku

Funkce: nastavení funkcí náramku

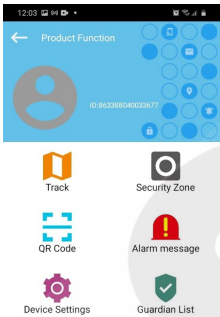

Track: historie

Security zone: neboli Geofence, nastavení konkrétní oblasti. Při opuštění této oblasti pošle náramek Alarm do aplikace. Možné je nastavit alarm: Při opuštění (Out), vstupu (In), Opuštění i vstupu (In & Out) do oblasti. **Nenastavujte Radius oblasti pod 100m, v takovém případě budete mít v aplikaci poplašné alarmy, které nebudou souhlasit s realitou.**

QR code: pro sdílení zařízení s jinými uživateli, kteří mají též nainstalovanou aplikaci

Alarm messages: historie zpráv

Device settings: Nastavení náramku

Guardian List: seznam členů rodiny, majících přístup k náramku.

Nastavení hodinek




Provozní režimy:


Normal mode - zde hodinky aktualizují polohu pravidelně v 15 minutových intervalech - vydrží 2-3 dny

Power Saving mode - úspora energie intervaly zasílání polohy jsou delší po 60 minutách (v tomto režimu vydrží hodinky nejdéle) - vydrží je 3 - 5 dní


Emergency Mode - lokalizace je nejpřesnější a to v intervalech 1 minuty, vydrží je 1 den - tento režim můžete použít v případě že je nutné rychle a přesně hodinky lokalizovat

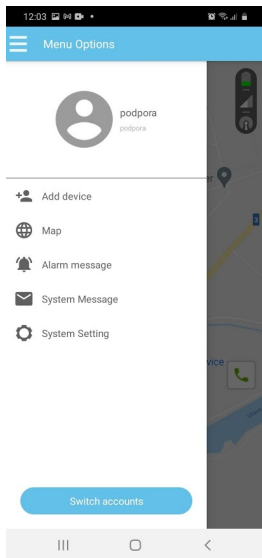

Tapnutím na ikonu, otevřete nastavení účtu:
Nickname: přezdívka
Change password: změna hesla
Bind email: spárovaný e-mail

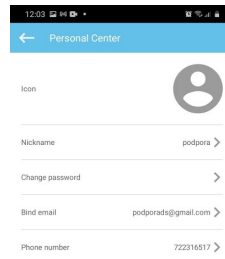

Tapnutím na System settings nastavíte:
Receive new message notification: aktivace notifikací
Sound: Zvukové notifikace
Non disturb at night: čas, kdy nechcete dostávat notifikace (např. večer)

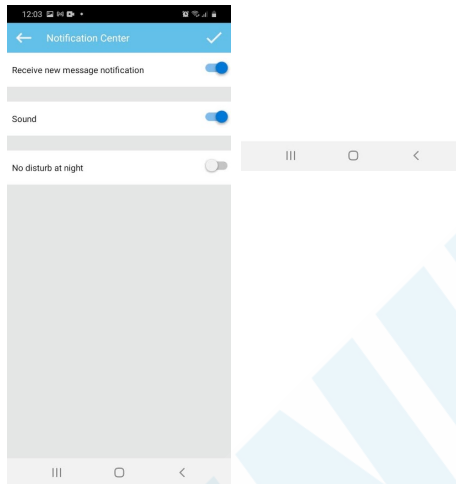

DS TECHNIK.CZ