

R232

Varování:

NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek k určení, kdy je bezpečné nebo legální řídit vůz nebo obsluhovat zařízení. **NENÍ BEZPEČNÉ** řídit nebo obsluhovat zařízení po konzumaci jakéhokoli množství alkoholu.

NEPOŽÍVEJTE jakékoli množství alkoholu, pokud je Vám méně než 18 let. Požívání alkoholu může být škodlivé pro Vaše zdraví (i pro zdraví Vašeho dítě, pokud konzumujete alkohol během těhotenství).

PŘÍSTROJ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. Nezodpovídáme za jakákoli zranění nebo škody vzniklé následkem nesprávného použití tohoto produktu a neposkytujeme zastupování, instrukce, úmluvy nebo záruky jakéhokoli druhu, vyslovené i nevyslovené, vztahující se k přesnosti, spolehlivosti nebo bezpečného použití tohoto produktu. Nákupem tohoto produktu souhlasíte s **UVOLNĚNÍM A ZBAVENÍM** se všech nároků vztahujících se k použití tohoto produktu proti výrobcí, distributorovi a prodejci.

R232


Digitální ALKOHOLTESTER

HE-0004

S LED podsvíceným displejem, hodinami, časovým alarmem a teploměrem

Návod k použití

R232

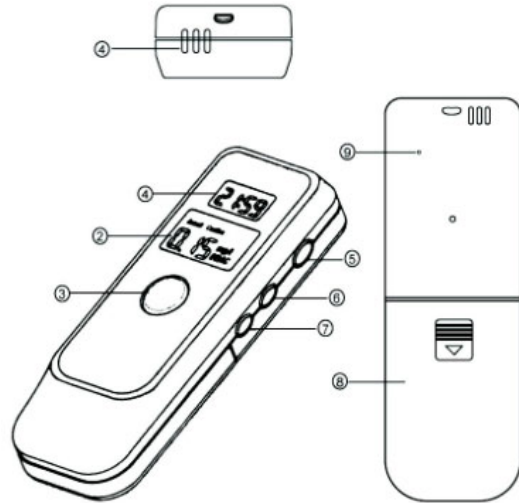

Popis

1. LCD osvětlené hodiny
2. LCD osvětlený digitální duální odečet
3. Tlačítko k zapnutí
4. Dechový inhalátor
5. Tlačítko MODE
6. Tlačítko SET
7. Tlačítko ADJ
8. Oddělení pro baterie (2x AAA baterie)
9. Tlačítko Reset

R232

- **Specifikace:**
 - Senzor – moderní polovodičový oxidový alkohol senzor
 - Rozsah detekce: 0.00% - 0.19% BAC (0.0 – 1.9g/l BRAC)
 - Přesnost: +/- 0.03% v 0.10% BAC
 - Napájení: 2x AAA alkalické baterie
 - Osvětlený duální digitální LED displej – 2 digitální odečet
 - Čas potřebný k zahřátí: méně než 10 sekund
 - Čas odezvy: méně než 5 sekund
 - Provozní rozsah teploty: 5 ~ 40 °C
 - Funce autovypínání
 - Ukazatel vybité baterie
 - Rozměry jednotky: 100 x 37 x 17 mm

R232

• Ověření teploty:


1. V normálním režimu zobrazení, stiskněte dvakrát tlačítko <MODE> pro vstup do režimu teploty.
2. Stiskněte tlačítko <ADJ> k nastavení zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

• Použití časovače (odpočtu):

1. V normálním zobrazení, stiskněte třikrát tlačítko <MODE> pro vstup do režimu časovače.
2. Stiskněte a na dvě sekundy držte tlačítko <SET> pro vstup do nastavení hodiny časovače, rozblíká se číslice hodiny, poté stiskněte tlačítko <ADJ> k nastavení Vámi vybrané hodiny.
3. Stiskněte znovu tlačítko <SET> pro vstup do nastavení vybrané minuty, rozblíká se číslice minuty, stiskněte tlačítko <ADJ> k nastavení Vámi vybrané minuty.
4. Stiskněte tlačítko <SET> k uložení nastavení časovače.
5. Stiskněte tlačítko <ADJ> pro spuštění odpočtu - pokud není hodnota na časovači 00:00, stiskněte tlačítko <ADJ> znovu k zastavení časovače.
6. Když odpočet na časovači dosáhne 00:00, zazní alarm a poté se znovu načte nastavená hodnota časovače.

• Resetování hodin:

K resetování nastavených hodnot hodin, časovače i alarmu na tovární nastavení, vložte tupý kolík nebo kancelářskou sponku do otvoru pro resetování v zadní části přístroje. Stiskněte jednou tlačítko reset uvnitř otvoru pro resetování k vymazání a resetování jednotek hodin, alarmu a časovače. **Toto neresetuje nebo nekalibruje alkohol senzor.**

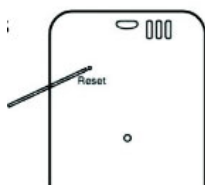

• Dodatečná opatření:

- Pro co možná nejpřesnější výsledky testování doporučujeme počkat přibližně 3 minuty před každým testem.
- **Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků nepijte, nekuřte ani nejezte 20 minut před testováním.**
- Nepoužívejte žádné chemikálie k čištění přístroje.
- Nelijte žádné tekutiny do senzoru přístroje.
- Výsledek dechového testování je **pouze doporučující**.

R232


• Vlastnosti:

1. LED osvětlený (duální odečet) digitální displej
2. LCD osvětlené hodiny zobrazující současný čas, časovač a teplotní senzor
3. Rozsah detekce: 0.00 – 0.19% %BAC & 0.0 – 1.9 g/l
(nebo 0.00 – 0.95 mg/l BRAC)
4. Čtení displeje v obou %BAC & mg/l BRAC
5. Rychlé zahřívání (méně než 10 sekund) a rychlá odezva při testování (méně než 5 sekund)
6. Automatické vypínání a indikátor slabých baterií
7. Senzorová kalibrace není vyžadována
8. Provoz s 2 AAA alkalickými bateriemi (nejsou součástí dodávky)

• Instalace baterií

2ks AAA alkalické baterie

1. Na zadní straně přístroje vysunutím odejměte kryt baterií, jak ukazuje obrázek níže:

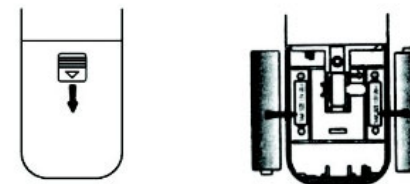

2. Vložte 2 AAA alkalické baterie, podle polarit, jak je vyznačeno uvnitř oddělení pro baterie.
3. Uzavřete toto oddělení vysunutím víčka, „klopnutím“ se kryt uzavře.

• Jak používat Alkoholový tester

Zahřívání jednotky (před použitím přístroje)

1. Stiskněte tlačítko k zapnutí. Přístroj jednou zapípá a zapne se displej.
2. Na LCD displeji se zobrazí symbol „warm-up“ (zahřívání) a začne cca 10 sekundový proces odpočtu než bude přístroj připraven k měření.




Poznámka: Pokud nebude první zahřívání dokončeno, přístroj se automaticky resetuje a začne nové zahřívání (1 až 3x). Pokud se jedná o první použití, nebo nebyl-li přístroj dlouho používán je zcela normální, že proběhne víc než jeden zahřívací proces.

R232

• Průběh dechového alkoholového testu

1. Ihned po zahřátí jednotky se na LCD displeji zobrazí ukazatel „Blow“ („foukat“). Příklad je nyní v režimu testování a je připraven k měření
2. Opatrně foukněte do dechového inhalátoru v horní části jednotky, od 3 do 5 sekund. Nepřetržitě (stabilně) foukejte během této doby do senzoru jednotky.
3. Poté se na displeji zobrazí Vaše výsledky testu v jednotkách %BAC i g/l.

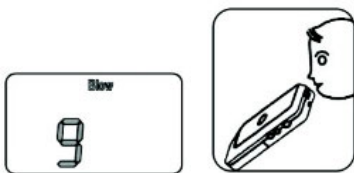

4. Příklad je nastaven tak, aby Vám poskytl 3 přibližné testovací rozsahy:
- Symbol „Caution“ („upozornění“) bude zobrazen při následující úrovni: 0.02% BAC (0.2g/l) až < 0.05% BAC (0.5 g/l)
 - Symbol „Danger“ („nebezpečí“) a zřetelné pípnutí se zobrazí v případě následující úrovně: 0.05% BAC (0.5 g/l) a vyšší



Speciální poznámka: Tyto úrovně varování/nebezpečí jsou pouze ODHADY a nestanovují, kdy je bezpečné či legálně řídit nebo obsluhovat vůz nebo zařízení.

• Funkce auto-vypínání

1. Vaše výsledky z testování budou zobrazeny na displeji přibližně po dobu 8 sekund poté, co se na obrazovce poprvé objeví. Poté se spustí funkce auto-vypínání a přístroj se automaticky vypne. Symbol „OFF“ se zobrazí na přibližně 2-3 sekundy před samotným vypnutím.



Poznámka: K dosažení přesnějšího načtení Vám navrhujeme zopakovat si test dvakrát až třikrát. Pro přesnější výsledky doporučujeme vyčkat přibližně 3 minuty mezi prováděním jednotlivých testů.

R232

Pro dosažení nejpřesnějších výsledků nepijte, nekuřte a nejezte 20 minut před prováděním testu.

• Ukazatel vybité baterie

Pokud se na LCD displeji objeví symbol „L“, indikuje, že baterie jsou příliš vybité pro správné fungování přístroje a musí být nahrazeny. Příklad je automaticky vypne.

Nahrazování baterií:

1. Doporučujeme užívání POUZE AAA alkalických baterií.
2. Řiďte se pokyny ze sekce Instalace baterií v tomto návodu pro otevření krytu, výměnu baterií a uzavření krytu.

• Jak nastavit hodiny:

1. V normálním režimu zobrazení stiskněte tlačítko <ADJ> k nastavení zobrazení hodin ve 12 nebo 24hodinovém formátu.
2. Stiskněte a držte tlačítko <SET> na 2 sekundy pro vstup do nastavení hodin, rozblíká se číslice hodin na LCD displeji, stiskněte tlačítko <ADJ> k nastavení.
3. Stiskněte znovu tlačítko <SET> pro vstup do nastavení minut, rozblíká se minutová číslice, poté stiskněte tlačítko <ADJ> pro nastavení minut.
4. Stiskněte tlačítko <SET> k uložení (uzamknutí).



• Jak používat LCD alarm:

1. V normálním režimu zobrazení, stiskněte jednou tlačítko <MODE> pro vstup do režimu alarmu.
2. Stiskněte tlačítko <ADJ> pro zapnutí/vypnutí alarmu.
3. Stiskněte a držte tlačítko <SET> po 2 sekundy pro vstup do nastavení hodiny alarmu, pak se na displeji rozblíká číslice hodiny. Stiskněte tlačítko <ADJ> k nastavení Vámi vybrané hodiny.
4. Stiskněte znovu tlačítko <SET> pro vstup do nastavení minuty alarmu, rozblíká se minutová číslice. Stiskněte tlačítko <ADJ> k nastavení Vámi vybrané minuty.
5. Stiskněte tlačítko <SET> k uložení.